

# A10

## ZeniPower\_助聽器電池 1.4V (10 個/卡)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 使用說明

助聽器電池為鋅空電池，需要與空氣接觸才能工作。在正式使用之前，不應讓電池接觸到空氣。電池上貼有粘性封貼，確保在使用前電池保持密封

請注意電池包裝上的日期，了解電池的有效時間。新電池剛開始使用時，可能需要等幾秒鐘再裝入助聽器，以便讓電池充分發揮作用。因為電池只有與空氣充分接觸後才會被激活

當電池電力不足時，打開電池艙蓋，取出電池，揭下新電池的封貼，將電池上標有“+”符號的一面（正極）向上裝入電池艙後，小心合上電池艙

不要將已耗盡電力的電池留在助聽器內，因已耗盡的電池可能會漏液而損傷助聽器。因此長時間不佩戴助聽器（如一周左右）時，應將電池取出

電池型號尺寸適用機型表

型號	外形尺寸 (毫米)	使用時間	適用機型
675	11.6*5.4	15-30 天	大功率耳背式 (BTE) 助聽器
13	7.9*5.4	10-20 天	耳背式 (BTE)、耳內式 (ITE)
312	7.9*3.6	7-15 天	耳內式 (ITE)、耳道式 (ITC)
10	5.8*3.6	4-10 天	深耳道式 (CIC)、迷你耳背機
A675P	11.6*5.4	2-5 天	人工耳蝸 (Cochlear Implant)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)